

Tabella di Compatibilità

Dispositivi Ufficialmente Validati

saremco print
CROWNTEC

STAMPANTE 3D

	SOL DENTIQ	Freeshape 120 G3	3
	MAX UV PRO 4K	MAX UV 2 MAX ULTRA	1 2 5 16
	SEGA		4
	D4K Micro Plus XL		1
	C1 PRO S		1
	3Delite 3Demax	DentaMile Desk MC-5	1 2 8 17
	Form 4B		18
	UltraCraft Chairside UltraCraft A2D	UltraCraft A2D 4K	10
	Versus 385		1
	Alpha Prime		1
	XiP		1 15
	NextDent 5100 LCD1	Distribuito dai rivenditori NextDent (Codice a barre richiesto)	6
	Sonic 4K 2022 Sonic 4K XL 2022		7
	Medical One		11
	D20 II D30 II D10+ D20+ cartridge D20+ D30+ D50+		1 2 8
	Shape 1+ Dental		14
	NBEE UBEE		12 13
	AccuFab-L4D/L4K AccuFab-D1s Accu-	Fab-CEL AccuFab-F1	9
	SF150, SF350, SF650		1

UNITÀ DI POLIMERIZZAZIONE

1	OtoFlash by NK-Optik 2 x 2000 Flashes	
2	HiLite Power by Kulzer 2 x 180 s	
3	CURIE 2 x 3 min T:6 P:16 D:10 B:ON	CURIE Plus by Ackuretta 2 x 2 min
4	Cure by DentaFab 1 x 10 min	
5	Photopol by Dentalfarm 2 x 4 min con vuoto	
7	LC-3DPrint Box 1 x 30 min	NextDent Cure by NextDent 1 x 10 min
8	Cure by Phrozen 2 x 5 min	
9	RS cure by Rapidshape 1 x 6 min	
10	Fab Cure 2 x 10 min	Fab Cure 2 by Shining 2 x 5 min (senza riscaldamento)
11	UltraCraft PCU 3.0 2 x 3 min 40% power	UltraCraft AirCure by HeyGears 2 x 3 min 10% power
12	Medical CW One by Prusa 2 x 10 min	
13	U Cure by UNIZ 2 x 2 min niveau 2	Impostazione manuale: segno: "+", "LEVEL", "CURE Time", "Save"
14	U Cure by UNIZ 2 x 4 min niveau 1	Impostazione manuale: segno: "+", "LEVEL", "CURE Time", "Save"
15	ShapeCure by RayShape 2 x 10 min (sans chauffage)	
16	xCure Desktop by Nexa 3D 2 x 2 min	Wash & Cure by Nexa 3D 2 x 10 min
17	PCU-LED N2 by Dreve 1 x 30 min	
18	DentaMile Cure MC by DMG 20%, 60°C, 30min	Validato su DentaMile Desk MC-5 per le tonalità A1, A2, A3, A3.5
19	FormCure 2 by Formlabs 1 x 10 min a 60°C	



Post-Processing Workflow

saremco print
CROWNTEC

1

Pulizia

saremco print CLEANING CONCENTRATE

Metodo consigliato – più semplice

- Mescolare il concentrato secondo le istruzioni
- Pulire in un bagno a ultrasuoni: 2 × 3 minuti



Pulizia a MANO

per proprietà meccaniche migliori



- Rimuovere la resina in eccesso con un pennello e una piccola quantità di alcol isopropilico al 96%
- Pulire accuratamente la superficie e l'interno
- Asciugare completamente con aria compressa

2

Caratterizzazione

Colorazione prima della polimerizzazione

Opzionale es. con saremco els paintart**

- Per un'estetica naturale
- Per una caratterizzazione superficiale duratura
- Applicare prima della fotopolimerizzazione finale per mantenere i dettagli e l'estetica durante l'uso



3

Polimerizzazione

Polimerizzare saremco print CROWNTEC

con un'unità validata (vedi pagina 1)

- Garantisce un equilibrio tra resistenza, stabilità e colore
- Assicurarsi di impostare correttamente il dispositivo

Segui tutti i passaggi nel video



4

Attivazione termica

Autoclave

Opzione A

- 5 minuti a 134°C / 276.2°F
- Per una tonalità finale stabile, estetica elevata e biocompatibilità



or

Acqua bollente

Opzione B (se l'autoclave non è disponibile)

- Almeno 2 minuti a 100°C / 212°F



Polimerizzazione con luce su ogni lato

- Utilizzare una lampada per fotopolimerizzazione*
- 2 × 20 secondi per lato a piena potenza



5

Lucidatura

Finitura a specchio

- Rifinire con frese diamantate da 40 µm e 12 µm
- Lucidare con dischi, spazzole o gommini in silicone fino a ottenere una brillantezza elevata



6

Cementazione

Cementare corone, inlay, onlay e faccette con un cemento composto

- es. saremco els cem**, Panavia 5 (Kuraray), Variolink (Ivoclar)
- Per corone singole: sabbiare la superficie interna (Al₂O₃, 110 µm)

* Le unità come OtoFlash o HiLite Power coprono una lunghezza d'onda di 320–500 nm. Altri dispositivi LED potrebbero non raggiungere le lunghezze d'onda più elevate e non completare la polimerizzazione estetica finale. Per accelerare la stabilizzazione del colore, si consiglia di inserire l'oggetto stampato per 5 minuti in autoclave (134 °C / 276,8 °F) oppure per almeno 2 minuti in un bagno d'acqua bollente (100 °C / 212 °F). Una lampada come Bluephase G2 di Ivoclar Vivadent può essere utilizzata in aggiunta (2 × 20 s per lato a piena potenza) per coprire l'intero spettro fino a 500 nm.

** I prodotti sono marcati CE e registrati presso la TGA.

Nota: Questa panoramica non sostituisce le istruzioni per l'uso. Fare sempre riferimento alle istruzioni ufficiali.

Informativa sulla privacy: Scansionando il codice QR si accede a YouTube. Si applicano le condizioni sulla privacy di YouTube.